



DONJOY® Tru-Pull® Lite

EN-Support for patella dislocation, subluxation, maltracking or instability causing anterior knee pain
FR-Maintien en cas de dislocations, sub-luxations, mauvais alignement ou instabilités rotuliennes générant des douleurs antérieures du genou
ES Soporte para casos de rotula dislocada, subluxación, mal alineamiento rotuliano o inestabilidad que causa dolor moderado o crónico en la rodilla anterior
IT-Supporto per sindrome femoro-rotulea, dislocazioni, sublussazioni o instabilità della rotula che causano dolore anteriore del ginocchio
DE-Unterstützung bei Luxation, Subluxation, Maltracking oder Instabilität der Knie Scheibe, die zu vorderem Knieschmerz führen
NL-Ondersteuning voor ontwrichting, subluxatie, maltracking of instabiliteit van de patella met als gevolg anterieure kniepijn

Comfortable, lightweight, low profile design
 - Design confortable, léger, discret
 - Diseño cómodo, liviano y de perfil bajo
 - Struttura a basso profilo leggera e confortevole
 - Bequem, leicht, flaches Design
 - Comfortabel, lichtgewicht, discreet ontwerp

Self adhesive buttress for patella stability
 - Insert rotulien auto-adhésif pour stabiliser la rotule
 - Refuerzo autoadhesivo para estabilidad de rótula
 - Con inserto per la stabilizzazione della rotula
 - Selbsthaftende Knie Scheibenpelotte zur Stabilisierung
 - Zelfklevende steun voor stabiliteit van de patella

"Y"-strap provides counterbalancing force to align patella
 - La sangle en "Y" applique une force de traction pour réaligner la rotule
 - Las cinchas en "Y" proporcionan tracción dinámica para realinear la rótula
 - La fascia a "Y" fornisce una forza di bilanciamento per l'allineamento della rotula
 - Selbsthaftende Knie Scheibenpelotte zur Stabilisierung
 - "Y"-vormige band biedt tegenwicht voor juiste positie van de patella

Flexible hinges for medial and lateral support
 - Articulations flexibles pour un support bilatéral additionnel
 - Articulaciones flexibles para un soporte medio y lateral
 - Aste articolate flessibili per supporto mediale e laterale
 - Flexible Gelenke zur beidseitigen Stützung
 - Flexibele scharnieren voor mediale en laterale ondersteuning



DONJOY® Tru-Pull® Lite

EN-Low profile patellofemoral brace
FR-Attelle fémoro-patellaire courte
ES-Rodillera femoro-patelar de bajo perfil
IT-Cinocchiera femoro-rotulea a basso profilo
DE-Flache Patellaorthese
NL-Discrete patellofemorale brace

Size
 Größe
 Taille
 Talla
 Taglia
 Maat

XS	33 - 39 cm	13" - 15 1/2"
S	39 - 47 cm	15 1/2" - 18 1/2"
M	47 - 53 cm	18 1/2" - 21"
L	53 - 60 cm	21" - 23 1/2"
XL	60 - 67 cm	23 1/2" - 26 1/2"
XXL	67 - 75 cm	26 1/2" - 29 1/2"
XXXL	75 - 82.5 cm	29 1/2" - 32"

Available in left or right
 Disponible pour le côté droit ou gauche
 Disponible para izquierda o derecha
 Disponibile per il lato destro o sinistro
 Rechts- oder linksseitig erhältlich
 Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

Contains one support
 Contient une orthèse
 Contiene un soporte
 Contiene un tutore
 Enthält eine Orthese
 Bevat één brace

DONJOY® Tru-Pull® Lite

DONJOY® Tru-Pull® Lite



DONJOY®
 Tru-Pull® Lite



DJO LLC
 1430 Decision Street
 Vista, CA 92081-8553
 USA

MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30775 Hannover
 Germany



1B-3833 REV. E - 2020-10-16 © 2020 DJO LLC

DONJOY
 Dimns. 4 X 2 X 9

12²³/₃₂

9

14¹⁷/₃₂